

VARICOSITÉS

- Pièce à main : **3D IPL S-530 nm**
- Onglet : **VARICOSITÉS**
- Réglages :

Applicateur	Phototype	Joules	Mode opératoire	Température (°C)
S-530	I	20-25	Simple	15
S-530	II	22-25	Simple	15
S-530	III	24-26	Simple	15

- Protocole :
 - **SÉANCES ESPACÉES DE 4 SEMAINES**
 - **VARICOSITÉS : NE PAS VENDRE EN CURE**
 - **ROUGEURS : BASCULER EN TRAITEMENT «LÉSIONS CUTANÉES»**
- Technique d'application :
 - **CONTACT AVEC LE GEL**
 - **UTILISATION DU POCHOIR**
 - **SUIVRE LE CHEMIN DE LA VARICOSITÉ**
 - **JUSQU'À 2 PASSAGES POSSIBLE**
- Recommandations :
 - **PHOTOS AVANT/APRÈS**
 - **APPLICATION D'UNE CRÈME HYDRATANTE**
 - **PAS D'EXPOSITION SOLAIRE 1 MOIS AVANT**
 - **PAS D'EXPOSITION SOLAIRE 1 SEMAINE APRÈS**
- Effets secondaires :
 - **DISPARITION INSTANTANÉE DE LA VARICOSITÉ (SI BONNE APPLICATION)**