

ACNÉ

- Pièce à main : **3D IPL S-430 nm**
- Réglages :
 - **SUIVRE LES RÉGLAGES INDIQUÉS PAR L'APPAREIL EN FONCTION DU TAUX DE MÉLANINE**
- Protocole :
 - **EN CURE DE 10 SÉANCES : 2 HEBDOMADAIRES LES 2 PREMIERES SEMAINES, PUIS 1 PAR SEMAINE**
 - **SÉANCES D'ENTRETIEN TOUS LES MOIS**
 - **ACNÉ LÉGÈRE OU INTENSE**
 - **PHOTOTYPES I, II ET III**
- Technique d'application :
 - **CONTACT AVEC LA PEAU**
 - **JUSQU'À 2 PASSAGES POSSIBLE**
 - **PASSAGE UNIQUEMENT SUR LA ZONE INFLAMMÉE**
- Recommandations :
 - **PHOTOS AVANT/APRÈS**
 - **NETTOYAGE PROFOND DE LA ZONE AVANT LA SÉANCE**
 - **APPLICATION D'UNE CRÈME HYDRATANTE**
 - **PAS D'EXPOSITION SOLAIRE DURANT LA DURÉE DU TRAITEMENT**
- Effets secondaires :
 - **ROUGEURS**
 - **SÉCHERESSES DANS LES JOURS SUIVANTS**