

# PHOTO RAJEUNISSEMENT

- Pièce à main : **3D IPL S-530 nm**
- Onglet : **LÉSIONS CUTANÉES**
- Réglages :

Applicateur	Phototype	Joules	Mode opératoire	Température (°C)
S-530	I	22	Simple	5
S-530	II	22	Simple	5
S-530	III	18	Simple	5

- Protocole :
  - **SÉANCES ESPACÉES DE 4 SEMAINES**
  - **ENTRETIEN TRIMESTRIEL**
  - **À LA SÉANCE OU EN CURE (5 OU 10 SÉANCES)**
- Technique d'application :
  - **CONTACT AVEC LA PEAU**
  - **DEUX PASSAGES POUR PHOTOTYPES I ET II**
  - **1 SEUL PASSAGE POUR LE PHOTOTYPE III**
- Recommandations :
  - **PHOTOS AVANT/APRÈS**
  - **APPLICATION D'UN MASQUE / CRÈME HYDRATANTE**
  - **PAS D'EXPOSITION SOLAIRE 4 SEMAINES AVANT**
  - **PAS D'EXPOSITION SOLAIRE 1 SEMAINE APRÈS**
- Effets secondaires :
  - **APPARITION DE CROUTELLES**
  - **HYDRATER, NE PAS GRATTER**
  - **INTENSIFICATION TEMPORAIRE DES TÂCHES/ROUGEURS**

*Vigilance : les contre-indications sont identiques à celles de l'épilation définitive.*